

GEBRAUCHSANWEISUNG

ultraROLLER I, ultraROLLER II, ultraSTAND

ultraMEDIC[®]

Zweckbestimmung

Krankentragen-Lagerungsgestell ist ein Medizinprodukt.

Indikation: geeignet als Hilfsmittel zur einfachen und schonender Verlegung von Patienten. **Kontraindikation:** keine

Benutzergruppe

Dieses Produkt darf laut dem § 2, Absatz 2 MPBetriebV nur vom sachkundigen, geschulten Fachpersonal benutzt werden. Voraussetzung ist theoretisches und praktisches Wissen in der Handhabung von Krankentragen-Lagerungsgestellen.

Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Um Bedienungsfehler zu vermeiden, bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.

Konformitätserklärung

Das Produkt wurde gemäß der gültigen EU-Verordnung 2017/745 hergestellt. Eine Konformitätserklärung zu diesem Produkt kann über den Händler oder Hersteller bezogen werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Prüfen Sie **vor** und **nach** jeder Anwendung den Krankentragen-Lagerungsgestell auf Unversehrtheit. Sollten Beschädigungen oder nur der Verdacht auf Beschädigungen auftreten, nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb.

Die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen vom Anwender und/oder Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anwendung

Der ultraROLLER ist ein Fahrgestell für Tragen. Der ultraSTAND ist ein Lagerungsgestell für Tragen. Diese Produkte dienen dazu, den Transport eines auf einer Trage fixierten Patienten zu erleichtern. Aus Sicherheitsgründen ist der ultraROLLER und der ultraSTAND auf jeder Seite mit einem Gummigürtel mit Metallhaken zur Befestigung der Krankentrage ausgestattet.

1. Die Krankentrage mit dem fixierten Patienten wird auf den ultraROLLER bzw. ultraSTAND gestellt.
2. Die Krankentrage mit dem fixierten Patienten wird mit den beiden Gummigürteln an der Seite des ultraROLLERS bzw. ultraSTANDs befestigt (Bild 1).

Lagerung

Lagern Sie den Krankentragen-Lagerungsgestell trocken und dunkel. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und direkte Wärmestrahlung von Heizquellen. Diese Faktoren können das Material beschädigen.

Wartung und Pflegehinweise

Desinfektion sollte gem. der Empfehlung von RKI „Flächendesinfektion nach Patientenkontakt“, bzw. mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln, erfolgen. Um die Sicherheit des Patienten und des Anwenders zu gewährleisten, empfehlen wir, den Krankentragen-Lagerungsgestell einer jährlichen Sichtprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen.

Lebensdauer

Die Abergereife richtet sich nach dem Zustand des Produktes, dessen Einsatzhäufigkeit und den äußeren Einsatzbedingungen. Die Lebensdauer des Krankentragen-Lagerungsgestells ist von den individuellen Einsatzbedingungen abhängig. Je nach Häufigkeit und Intensität der Nutzung des Krankentragen-Lagerungsgestells ist eine Abnutzung normal. Auch bei sorgfältiger Behandlung unterliegt das Material einem Alterungsprozess. Aussonderung des Produktes sollte nach Beurteilung dessen Zustands erfolgen. Eine sachgemäße Anwendung wird hier vorausgesetzt.

ultraROLLER II


MD CE

Krankentragen-Lagerungsgestell
klappbar

REF SAN-0134

25 kg

200 kg

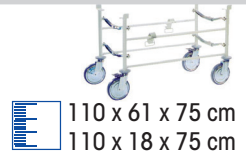

ultraROLLER I


MD CE

Krankentragen-Lagerungsgestell

REF SAN-0135

22 kg

200 kg

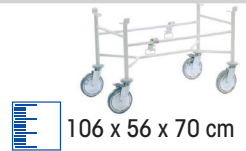

ultraSTAND

MD CE

Krankentragen-Lagerungsgestell
klappbar, mit Schocklagerungsfunktion

REF SAN-0400

22 kg

200 kg

