

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## ultraDRAG

### Rollschlepe



5 kg



150 kg



690 x 1985 mm



SAN-9010



- 1 ausrollbare Platte mit Griffmulden
- 3 Patientengurte
- 4 Tragegurte
- 1 Schleppgurt mit 2 Griffen
- 1 Aufrollgurt zur Fixierung der aufgerollten Platte



UDI-DI 9010710120647 RL1000LOH-V02 RollIUP Ultramedic SAN-9010

**Wichtige Hinweise:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Um Bedienungsfehler zu vermeiden, bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.

**Zweckbestimmung des Produkts:** Die Rollschlepe ist ein Mediziprodukt und dient zum Transport von Kranken und Verletzten im unwegsamen Gelände.

**Hinweise zur Sicherheit:** Die Rollschlepe sollte nur von geschultem Personal eingesetzt werden. Der Umgang mit diesem Medizinprodukt ist Bestandteil der Ausbildung bei den Hilfsorganisationen.

- Die Rollschlepe darf nicht für andere Zwecke (z.B. allgemeine Sachtransporte) verwendet werden.
- Rollschlepe darf erst nach dem Schließen der Patientengurte bewegt werden.
- Die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen vom Anwender und/oder Patient dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.

**Achtung!** Nicht auf die offenen Patientengurte treten!

Prüfen Sie vor jeder Anwendung die Rollschlepe auf Unversehrtheit.

**Handhabung:** Legen Sie den Patienten mit dem Kopf auf das schmale Ende der Rollschlepe und sichern Sie ihn mit den drei Patientengurten. Danach kann der Patient mit der Rollschlepe getragen werden.

Ist aufgrund unmittelbarer Gefahr durch die Umgebung Eile geboten und nicht ausreichend Personal verfügbar, um den Patienten mit der Rollschlepe zu tragen, so kann der Patient mit Hilfe des Schleppgurtes über den Boden gezogen werden. Dies ist jedoch nur bei unmittelbarer Gefahr in Verzug durchzuführen.

Prüfen Sie vor dem Tragen des Patienten die Patientengurte auf sicheren Halt.

**Reinigung:** Reinigen Sie die Rollschlepe nach dem Einsatz mit Wasser oder handelsüblichen Putzmitteln und desinfizieren Sie die Rollschlepe anschließend. Hierfür dürfen nur BGA-zugelassene Mittel zum Einsatz kommen. Äther, Heizöl, Diesel, Benzin und Motoröl können das Gewebe und die Beschichtung beschädigen.

**Wartung:** Um im Einsatz die Sicherheit des Verletzten und des Benutzers zu gewährleisten, empfehlen wir, die Rollschlepe einer jährlichen Sichtprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen.



**Sollten Beschädigungen oder ein Verdacht auf Beschädigungen auftreten, nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb, bis die aufgetretenen Unregelmäßigkeiten behoben sind.**

**Reparatur:** Eine evtl. anfallende Reparatur darf nur vom Hersteller ausgeführt werden und es dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.

**Garantie:** Die Garantie beginnt mit der Übernahme durch den Empfänger. Sie umfasst Schäden infolge Herstellungs- und Materialschäden, nicht jedoch wegen unsachgemäßer Benutzung.